

# NOCOLYSE

Färdigblandat  
desinfektionsmedel



■ ■ Tillverkad i Frankrike av Oxy'Pharm enligt ISO 13485.

Använd biocidprodukter försiktigt. Läs etiketten och produktinformationen före användning.

**Nocolyse** är en yt-biodesinfektionsprodukt. Det är en färdigblandad lösning med en bas av 6 % väteperoxid, som endast är kompatibel med maskiner från **Nocotech-sortimentet**.

## Nocolyse Nocospray eller Nocomax

är effektiv mot alla typer av mikroorganismer: denna kombination desinficerar ytor med en bakteriedödande, svampdödande, virusdödande, jästdödande, tuberculocidal och sporicid effekt.



Biologiskt nedbrytbar



Inga rester



Giftfri



Ikke korridorande



Ikke allegriframkallande



Inget bakteriemotstånd

## SAMMANSÄTTNING

Stabiliserad väteperoxidlösning 6% (60 ml/l) • EC= 231-765-0 / CAS=7722-84-1. Silver 17 ppm • EC= 231-131-3 / CAS=7440-22-4.

## FÖRVARING

Förvara produkten i originalförpackningen, upprätt och på ett svalt, välventilerat utrymme.

- Förvaring i stängd originalförpackning: 2 år från tillverkningsdatum.
- Förvaring en gång öppnad: 2 månader från öppningsdatum.

## FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID ANVÄNDNING

Se produktens säkerhetsdatablad, tillgängligt på begäran via e-post: [info@biohygienteknik.com](mailto:info@biohygienteknik.com)

## REFERENS OCH FÖRPACKNING

	NEUTRAL	MINT	NOCODOR
1 L FLASKA	4000.001	4001.001	4030.001
6 X 1 L LÅDA	4000.001-6	4001.001-6	4030.001-6
5L DUNK	4000.005	4001.005	4030.005
10L DUNK	4000.010	4001.010	4030.010
20L DUNK	4000.020	4001.020	4030.020

## INSTRUCTIONS FOR USE



- 1 Följ instruktionerna för **Nocotech**
- 2 Skruva fast 1L flaska för Nocospray eller 20 L dunk till **Nocomax**.
- 3 Ställ in volymen (V) i enlighet med behandling (se nedan)
- 4 Efter spraytiden är det viktigt att respektera kontakttiden enligt nedan.

AKTIVITET	VOLYM (V) *	KONTAKT TID	REDUKTION MINIMUM **
Baktericid	5 x Rumsvolymen som skall behandlas	2 hours	log ≥ 5
Jästicid	5 x Rumsvolymen som skall behandlas	2 hours	log ≥ 4
Sporicid	5 x Rumsvolymen som skall behandlas	2 hours	log ≥ 3
Mykobaktericid	5 x Rumsvolymen som skall behandlas	2 hours	log ≥ 4
Virucid	5 x Rumsvolymen som skall behandlas	2 hours	log ≥ 4
Fungicid	5 x Rumsvolymen som skall behandlas	2 hours	log ≥ 4

\* Protokollen som visas i effektivitetstabellen ovan överensstämmer med de resultat som erhållits under laborietester utförda i enlighet med standarden NF EN 17272. Varje användare kan dock definiera och validera ett användningsprotokoll som uppfyller deras egna behov vad gäller effektivitet.

\*\* Loggreduktionerna som visas i tabellen ovan är det minimum som krävs av standardprotokollet. Större minskningar kan erhållas (upp till 6 log).

### VIKTIGT

- Håll rummet stängt under hela maskinens drift och under kontakttiden. Rummet skall inte beträdas och behandling skall inte göras i närheten av människor.
- För att erhålla en desinfektion av god kvalitet är det viktigt att man följer ett strikt rengöringsprotokoll som utförs före behandlingen.